



## Gesichtsmaske mit Draht zum Binden

Die Gesichtsmaske ist **kein Medizinprodukt** und schützt nicht vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus. Das Tragen der Gesichtsmaske vermindert die Verbreitung von Tröpfchen, die man selbst beim Sprechen usw. ausstößt, außerdem verdeckt sie Mund und Nase und vermindert damit die Möglichkeit einer Schmierinfektion. Durch das Tragen der Maske und die Einhaltung der weiteren Abstands- und Hygieneregeln kann das Ansteckungsrisiko vermindert werden.

Die Gesichtsmaske ist 2-lagig aus unserem hochwertigen ÖKO-Tex-zertifizierten Tragetuchgewebe hergestellt, wird seitlich gerafft und über dem Kopf mit Bindebändern befestigt. Zwischen den beiden Stofflagen **kann ein auswechselbarer Einwegfilter**, ein Taschentuch o. ä. **ingelegt werden**. In die obere Stoffkante ist **ein biegsamer Draht eingearbeitet**, damit die Maske gut abschließend um die Nase geformt werden kann. Dies ist für den **optimalen Sitz gerade für Brillenträger** von Vorteil.

Maße: 20,5 cm x 18 cm

### Trageanleitung:

- Bevor Sie die Maske aufsetzen, waschen Sie sich die Hände mit Seife und warmem Wasser oder reinigen Sie die Hände mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.
- Legen Sie sich die Maske um den Hals und raffen Sie den Stoff.
- Bringen Sie die Maske in die Richtige Position über Mund und Nase und verschließen Sie die Bindebänder am Kopf. Mit Hilfe des Drahtes wird ein optimaler Abschluss um die Nase erreicht.



Sobald die Gesichtsmaske feucht ist, tauschen Sie diese aus und bewahren Sie die gebrauchte Maske bis zur Wäsche in einem verschließbaren Plastikbeutel auf. Den ggf. eingelegten Filter vor dem Waschen entfernen und entsorgen.

**Hinweis:** Maske bitte regelmäßig und vor dem ersten Tragen bei 60°C waschen. Mit heißem Dampf bügeln, so können Bakterien, Viren und andere Erreger reduziert bzw. beseitigt werden.

**Material:** äußere Lage: Tragetuchstoff aus 100% Baumwolle mit Zertifikat ÖKO-Tex 100 Produktklasse I  
innere Lage: 100 % Baumwolle

**Pflege:** waschbar bis 60°C, bügeln mit hoher Temperatur (drei Punkte); nur auf niedrigen Touren schleudern, damit der Nasendraht bei der Wäsche unversehrt bleibt; nicht in die Mikrowelle geben

**Gesichtsmasken sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen, da Hygieneartikel.**

Hergestellt in der EU