



Gesichtsmaske zum Binden

Die Gesichtsmaske ist **kein Medizinprodukt** und schützt nicht vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus. Das Tragen der Gesichtsmaske vermindert die Verbreitung von Tröpfchen, die man selbst beim Sprechen usw. ausstößt, außerdem verdeckt sie Mund und Nase und vermindert damit die Möglichkeit einer Schmierinfektion. Durch das Tragen der Maske und die Einhaltung der weiteren Abstands- und Hygieneregeln kann das Ansteckungsrisiko vermindert werden.

Die Gesichtsmaske ist 2-lagig aus unserem hochwertigen ÖKO-TEX-zertifizierten Tragetuchgewebe hergestellt und wird mit Bindebändern befestigt.

Maße:

M	22 cm x 10,5 cm (aufgefächert 19 cm)
S	20,5 cm x 8 cm (aufgefächert 15 cm)

Trageanleitung:

- Bevor Sie die Maske aufsetzen, waschen Sie sich die Hände mit Seife und warmem Wasser oder reinigen Sie die Hände mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.
- Legen Sie sich die Maske um den Hals und verschließen Sie die Bindebänder.
- Bringen Sie die Maske in die Richtige Position über Mund und Nase und verschließen Sie die Bindebänder am Kopf.



Sobald die Gesichtsmaske feucht ist, tauschen Sie diese aus und bewahren Sie die gebrauchte Maske bis zur Wäsche in einem verschließbaren Plastikbeutel auf.

Hinweis: Maske bitte regelmäßig und vor dem ersten Tragen bei 60°C waschen. Mit heißem Dampf bügeln, so können Bakterien, Viren und andere Erreger reduziert bzw. beseitigt werden.

Material: äußere Lage: Tragetuchstoff aus 100% Baumwolle mit Zertifikat ÖKO-TEX 100 Produktklasse I
innere Lage: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Pflege: waschbar bis 60°C, bügeln mit hoher Temperatur (drei Punkte); nicht in die Mikrowelle geben

Gesichtsmasken sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen, da Hygieneartikel.

Hergestellt in Deutschland (Sachsen)